

# EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

Eldiven :

DermaShield® 73-711

Kimyasal Madde	Breakthrough Time	Koruma İndeksi	CAS Numarası	Notified Body	EN Standard
%95 etil alkol + %5 dettol	24	1		Centexbel	374-3:2003
Amonyum Hidroksit, %25	26	1	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
Asetik asit, kristalize	46	2	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
Aseton	2	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
Asetonitril	8	0	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
Bütil alkol	> 480	6	71-36-3	Centexbel	374-3:2003
Cidex™ OPA	> 480	6	643-79-8	Force Technology	374-3:2003
Dietil eter	0	0	60-29-7	Centexbel	374-3:2003
Dimetilacetamid	5	0	127-19-5	Centexbel	374-3:2003
Etil alkol	73	3	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
Etil alkol, %70	44	2	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
Etil alkol, %99,7	27	1		Centexbel	374-3:2003
Fopsforik Asit, %85	> 480	6	7664-38-2	Centexbel	374-3:2003
Formaldehid, %35	> 480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2003
Formaldehid, %4	> 480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2003
Formik Asit, %98-100	350	5	64-18-6	Force Technology	374-3:2003
Hidrobromik Asit, %37	> 480	6	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
Hidroflorik Asit, %10	>480	6	7664-39-3	centexbel	374-3:2003
Hidroflorik Asit, %48	405	5	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003

## EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Tavsiye edilmez	Sıçrama Koruması		Orta Seviye Koruma		Yu ksek Seviye Koruma	

Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır veya laboratuvar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir. Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu



# EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

Eldiven :

DermaShield® 73-711

	Kimyasal Madde	Breakthrough Time	Koruma İndeksi	CAS Numarası	Notified Body	EN Standard
	Hidrojen Peroksit	> 480	6	7722-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Hydrofluoric Acid, 60%	>195	4	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Metil alkol	18	1	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Metil etil keton	1,25	0	78-93-3	Centexbel	374-3:2003
	Metil metakrilat	2	0	80-62-6	Centexbel	374-3:2003
	Metil İzobütil Keton	< 5	0	108-10-1	Centexbel	374-3:2003
	Nitrik Asit, %70	> 480	6	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Nitrik Asit, fuming, %100	1	0	7697-37-2	Force Technology	374-3:2003
	Pridin	1	0	110-86-1	Centexbel	374-3:2003
	Sikloheksan	7	0	110-82-7	Centexbel	374-3:2003
	Sikloheksanon	5	0	108-94-1	Centexbel	374-3:2003
	Sodyum Hidroksit, %40	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Suda etidyum bromid (doymuş, ± 5%)	> 480	6	1239-45-8	Centexbel	374-3:2003
	Sülfürik asit, %96	105	3	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahidrofuran	0	0	109-99-9	Centexbel	374-3:2003
	Tolüen	1	0	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	klorheksidin glukonat	> 480	6		Force Technology	374-3:2003
	İzo-oktan	50	2	540-84-1	Centexbel	374-3:2003
	İzopropanol	234	4	67-63-0	Centexbel	374-3:2003

## EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Tavsiye edilmez	Sıçrama Koruması		Orta Seviye Koruma		Yu ksek Seviye Koruma	

Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır veya laboratuvar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir. Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

