

EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

Eldiven :

NeoTouch® 25-201

	Kimyasal Madde	Breakthrough Time	Koruma İndeksi	CAS Numarası	Notified Body	EN Standard
	Akrilamid, %40	> 480	6	79-06-1	Force Technology	374-3:2003
	Amonyum Hidroksit, %25	9	0		Centexbel	374-3:2003
	Anioksid™ 1000	> 480	6		Force Technology	374-3:2003
	Asetik asit, kristalize	17	1	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Aseton	0.2	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Asetonitril	< 5	0	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Cefuroxim Sodyum tuzu 15 g/l	> 480	6		Force Technology	374-3:2003
	Cidex™	> 480	6	111-30-8	Force Technology	374-3:2003
	Cidex™ OPA	> 480	6	643-79-8	Force Technology	374-3:2003
	Dietil eter	0.2	0	60-29-7	Centexbel	374-3:2003
	Dimetil Sülfoksit	10	1	67-68-5	Force Technology	374-3:2003
	Dimetilacetamid	4.8	0	127-19-5	Centexbel	374-3:2003
	Dimetilformamid	2	0	68-12-2	Force Technology	374-3:2003
	Etil alkol, %70	14	1	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
	Etil alkol, %96	6	0	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
	Etil asetat	1	0	141-78-6	Centexbel	374-3:2003
	Formaldehid, %35	> 480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2003
	Formaldehid, %4	> 480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2003
	Hekzan	< 5	0	110-54-3	Centexbel	374-3:2003

EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Tavsiye edilmez	Sıçrama Koruması		Orta Seviye Koruma		Yu ksek Seviye Koruma	

Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır veya laboratuvar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir. Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu



EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

Eldiven :

NeoTouch® 25-201

	Kimyasal Madde	Breakthrough Time	Koruma İndeksi	CAS Numarası	Notified Body	EN Standard
	Heptan	< 5	0	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Hidrobromik Asit, %37	101	3	7647-01-0	Force Technology	374-3:2003
	Hidroflorik Asit, %10	>480	6	7664-39-3	Centexbel	374-3:2003
	Hidroflorik Asit, %48	29	1	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Hidrojen Peroksit	408	5	7722-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Ksilen	< 5	0	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	Metil alkol	9	0	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Metil etil keton	0.2	0	78-93-3	Centexbel	374-3:2003
	Metil metakrilat	0.5	0	80-62-6	Force Technology	374-3:2003
	Metronidazole solüsyon 5g/l	> 480	6	443-48-1	Force Technology	374-3:2003
	Nitrik Asit, %70	29	1	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Perkloroetilen	< 5	0	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Pridin	0.3	0	110-86-1	Centexbel	374-3:2003
	Sikloheksan	< 5	0	110-82-7	Centexbel	374-3:2003
	Sodyum Hidroksit, %40	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Sülfürik asit, %98	7	0	7664-93-9	Force Technology	374-3:2003
	Tetrahidrofur	0.2	0	109-99-9	Centexbel	374-3:2003
	Tolüen	0.3	0	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Trietilamin	< 5	0	121-44-8	Centexbel	374-3:2003

EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Tavsiye edilmez	Sıçrama Koruması		Orta Seviye Koruma		Yu ksek Seviye Koruma	

Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır veya laboratuvar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir. Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu



EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

Eldiven :

NeoTouch® 25-201

Kimyasal Madde	Breakthrough Time	Koruma İndeksi	CAS Numarası	Notified Body	EN Standard
o-Toludin	3	0	95-53-4	Force Technology	374-3:2003
İzopropanol	30	2	67-63-0	Centexbel	374-3:2003

EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Tavsiye edilmez	Sıçrama Koruması		Orta Seviye Koruma		Yu ksek Seviye Koruma	

Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır veya laboratuvar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir. Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

